



- Monteringsanvisning Framgaffel och Hjul Fellow Supreme
- Monteringsanvisning Handbroms och Vajer för Fellow Classic & Fellow Supreme







#	Artikel	Artikelnummer	Antal
1	Framgaffel höger	89204	1
1	Framgaffel vänster	89206	1
2	Vågbricka	93012008	2
3	Passbricka	93015025	2
4	Hjul komplett	93017025	3
5	Passbricka	93015026	2
6	Bricka	89203	1
7	Låsmutter	93011008	1
8	Navkapsel	93017024	1
9	Kullager	00887	2
10	Låsmutter	00888	1
11	Plasthatt	AL-10147	1



Instruktioner

1. Demontera det gamla hjulet, med hjälp av fast nyckel 17 mm.
2. Ta den nya framgaffeln och sätt på brickorna i följande ordning:
#2 Vågbricka, #3 Passbricka
3. Sätt på hjulet (#4) på framgaffeln
4. Sätt på de resterande brickorna i följande ordning: #5, #6
5. Skruva fast Låsmutter (#7) med fast nyckel 10 mm.
6. Sätt på Navkapseln (#8)
7. Ta den nya gaffeln och sätt på ett Kullager (#9)
8. Stick in Framgaffel med hjul och kullager i rollatorns ram.
9. Sätt på det andra kullagret (#9)
10. Skruva fast Låsmutter (#10) med hjälp av fast nyckel 17 mm.
10. Sätt på Plasthatten (#11).

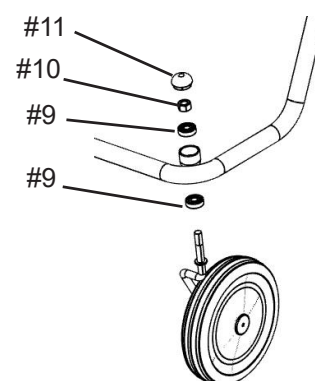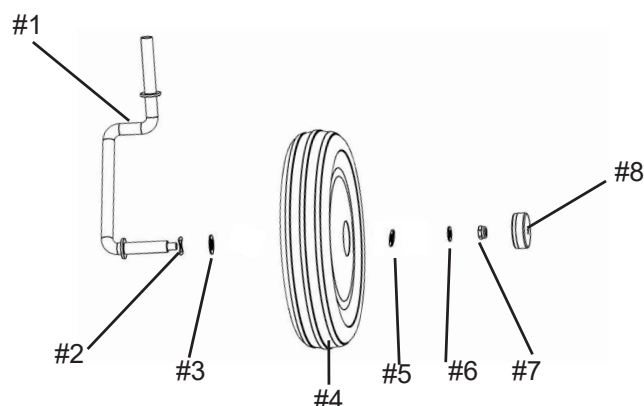




#	Artiklar	Artikelnummer
1	Vajer komplett	00891
2	Bromsfjäder	AL-10142
3	Bromsbygel	AL-10139
4	Mutterskydd	200.1005
5	Låsmutter	93011008

*Bild på Fellow Classic standard men även relevant för alla andra storlekar, samt Fellow Supreme



Instruktioner

Se instruktioner på nästa sidor.

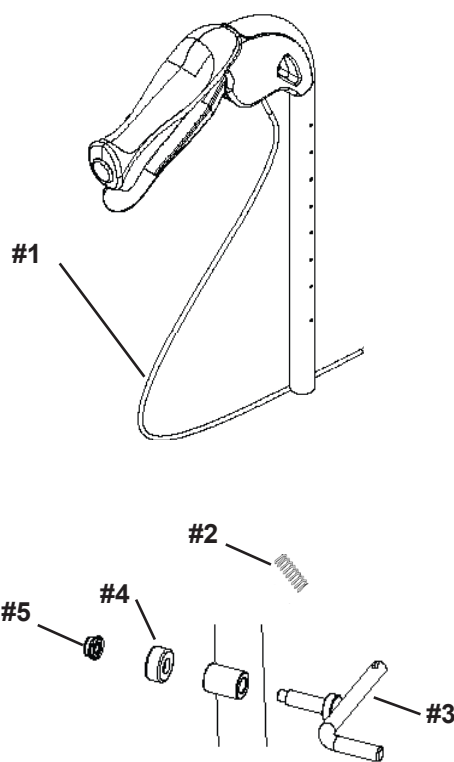



Demontering broms och vajer

1. Skruva loss handtaget med stjärnskruvmejsel.



2. Lossa det gråa handtagsgreppet med hjälp av skruvmejseln.

3. Dela på de två handtagsdelarna genom att bända isär mitten med en skruvmejsel.



4. Lossa bromsvajern från hantaget genom att trycka ut den grå pinnen. Spara de inre delarna: plasthjul samt grå pinne.



5. Lossa på bromsvajern genom att dra ut den från springan i bromsbygeln med plattång.



6. Ta av bromsfjädern och spara till senare.

7. Dra ut bromsvajern ur hållaren på rollatorn.


8. Skruva loss bromsbygeln med fast nyckel 10 mm.






Montering ny broms och vajer

1. För in den nya bromsbygeln i rollatorramen och fäst Mutterskydd (#4) följt av Låsmutter (#5).

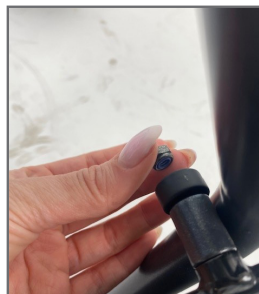

2. Dra åt med fast nyckel 10 mm.

3. Fäst den nedre delen av vajern i bromsbygeln genom att föra in vajerns ände i rollatorramen.

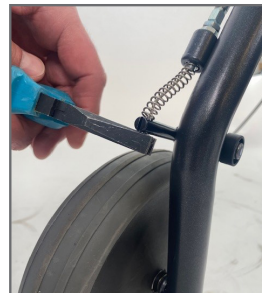


4. Trä på bromsfjäders och dra änden på vajern in i bromsbygeln springa med plattång.



5. Lägg hantagsdelarna på en plan yta för överblick.

Placera handtagsröret så att hålet passar med den utåttickande pinnen i ena handtagshalvan.

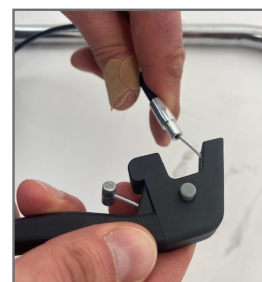

6. Böj vajerns övre del och för in i bromshandtaget, följt av plasthjulet som du sparade, och fäst med den grå pinnen.



7. Placera vajerns yttersta del i det förgjutna hålet på handtagsbromsen.

8. Håll på plats och montera på den andra handtagshalvan.



Montering ny broms och vajer

9. Montera ihop de två handtagshalvorna genom att använda de sparade skruvarna och stjärnskruvmejsel 10 mm.



10. Montera ihop handtaget med handtagsgreppet genom att skruva ihop med den sista skruven.



11. För in det monterade handtagsröret i rollatorramen, vrid om vingvredet.

12. Justera muttrarna på vajerns nedre ände för att få rätt bromsfunktion i handtaget.

